



## SPEEDY TEXTUR & FITTING KIT

- Universal Oberflächenstruktur- und Aufpassmittel -

Schluss mit schmutzigen Fingern, Modellen und Arbeitsplätzen beim Arbeiten mit Oberflächentextur Silberpulver/-pulver, Okklusprays, usw. Das neuartige *SPEEDY TEXTUR & FITTING KIT* macht es möglich.

### Einsatz Oberflächenstruktur:

Die *Textur- & Fitting-Cream* wird gezielt mit dem *Tele-Textur- & Fitting-Brush*, mit praktischer Alu-Schutzhülse, auf die Modelle/Kronenoberflächen **dünn** aufgetragen. Die Oberflächenstruktur, Formkontur und Gesamtharmonie der Arbeit werden somit visuell ohne störende Farbunterschiede hervorgehoben. Es lässt sich leicht kontrollieren ob die Strukturen und Übergänge soft und fließend sind. Feinheiten werden klar erkennbar und leicht korrigierbar.

### Einsatz Aufpassmittel:

Die *Textur- & Fitting-Cream* ist bestens geeignet zur Sichtbarmachung von Störstellen beim Aufpassen von Kronen und Sekundärteilen, beim Aufpassen von Basalflächen bei Zwischengliedern, beim Einschleifen von Approximalpunkten und beim systematischen Einschleifen der Okklusion. Die *Textur- & Fitting-Cream* ist universell einsetzbar für Metall, Vollkeramik, Zirkon, Acetal, Polyapress, sowie bei sämtlichen Kunststoffen. Farbauftrag markiert mehrmals. **WICHTIG:** Die *Textur- & Fitting Cream* extrem dünn/sparsam auftragen!

### **Zu beachten:**

- Pinselspitze ganz leicht über die *Textur- & Fitting-Cream* streifen und dünn auftragen
- Pinselspitze regelmäßig mit einem Zellstofftuch reinigen
- Pinselspitze immer bei Nichtgebrauch in der teleskopierenden Aluminiumhülse aufbewahren
- Dose immer gut schließen
- *Textur- & Fitting-Cream* durch Abdampfen leicht entfernbar

### **Tipps:**

- Betrachten Sie Ihre Arbeit mit *Textur- & Fitting-Cream* bei frontalen und seitlichen Licht. Somit lassen sich besser die unterschiedlichen Darstellungen der Struktur erkennen.
- Für den letzten Schliff der Formkorrektur. Die Formkorrektur lässt sich am einfachsten mit dem Mirror-Flachspiegel, der aufgeklappt praktisch zum Handhaben ist, begutachten. Schauen Sie sich die Arbeit aus der Perspektive des Patienten an. Sie haben somit eine ganz neue Betrachtungsweise der Arbeit. Leichte Formdisharmonie ist somit sofort erkennbar und gezielt korrigierbar. Ihre Lieblingsperspektive ist damit ausgeschaltet.



## BESTELLUNG

einfach per FAX +49(0)821/5892553

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt	Einzelpreis €*	Menge	Gesamtpreis €*
SPEEDY TEXTUR & FITTING KIT	A71004	7ml Dose Textur- & Fitting-Cream silver 1 Tele-Textur- & Fitting-Brush, Rotmarderhaar 1 Mirror-Flachspiegel	39,80		
Textur- & Fitting-Cream	A71005	7 ml Dose Textur- & Fitting-Cream silver	21,30		
Tele-Textur- & Fitting-Brush	A71006	1 Tele-Textur- & Fitting-Brush, Rotmarderhaar	13,90		
Mirror-Flachspiegel	A71007	1 Mirror-Flachspiegel	5,50		

\*Preise zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer und Versand

**Absender:** \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße, HsNr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift, Stempel \_\_\_\_\_

**WICHNALEK**

**Dentale Schulung/Entwicklung/Vertrieb**

Hochfeldstr. 62

D-86159 Augsburg

**Fax +49(0)821/5892553**

**Tel: +49(0)821/571212**

info@wichnalek.com, www.wichnalek.com